



# ハートスタート HS1 機器説明

①引いて電源ON  
→自動的に音声ガイダンススタート

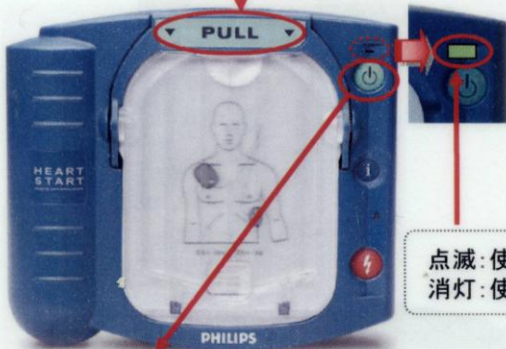

▶電源ボタンON/OFF  
→電源ボタン長押しで、電源OFF

②パッドを患者の胸に装着してください  
→解析ランプが点滅します

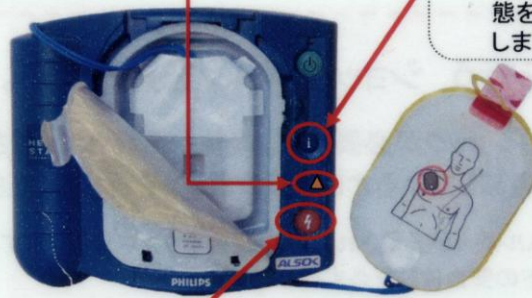

▶「i」インホメーションボタンを押すと  
→機器の現在の業態を音声でご案内します

点滅:使用可能  
消灯:使用不可

③ショックボタン  
→ボタンを押してショック実行

## AED使用した心肺蘇生法

### 1)反応の確認をする

肩を軽く叩きながら「わかりますか？」などと2～3回呼びかけます。

わかりますか？



### 2)大声で協力を求める

「誰か来てください！  
人が倒れています。」

人が倒れてます>あなた119番報  
通報してください。  
あなたAEDをもってきてください。



### 3)人工呼吸2回、胸骨圧迫30回を繰り返す

普段どおりの息がなければ人工呼吸を行いません。  
鼻をつまみ顎をあげて人工呼吸を2回行います。

**2 : 30 強く、正しく、絶え間なく**



2回



30回

人工呼吸2回と胸骨圧迫30回を繰り返します。

### 4)AEDの電源を入れる



緑のハンドルを引くと自動的に電源が入ります



電源を入れた後は、  
音声メッセージで案内されます。

### 5)電極パッドを傷病者の胸にはる

カードリッジから電極パッドを取り出し、  
表面に描かれている位置に貼ります。




『絵の通りにパッドを貼ります。』



パッドが貼られると  
自動的に解析が始まります。


# ハートスタート HS1 機器説明

①引いて電源ON  
→自動的に音声ガイダンススタート

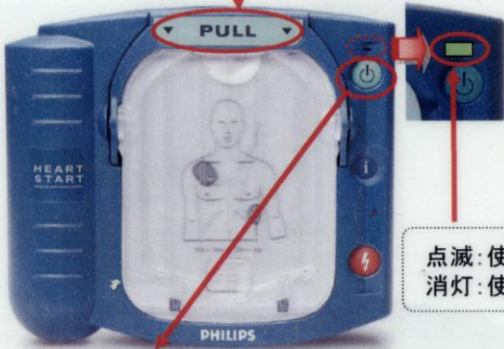

▶電源ボタンON/OFF  
→電源ボタン長押しで、電源OFF

②パッドを患者の胸に装着してください  
→解析ランプが点滅します

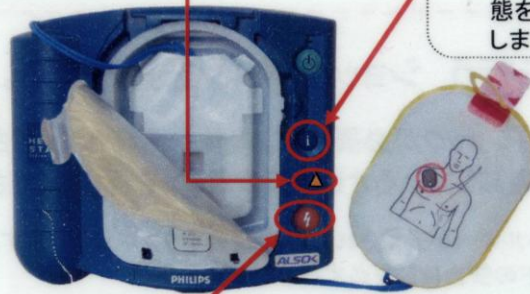

▶「i」インホメーションボタンを押すと  
→機器の現在の業態を音声でご案内します

点滅:使用可能  
消灯:使用不可

③ショックボタン  
→ボタンを押してショック実行

## AED使用した心肺蘇生法

### 1)反応の確認をする

肩を軽く叩きながら「わかりますか？」などと2~3回呼びかけます。

わかりますか？



### 2)大声で協力を求める

「誰か来てください！  
人が倒れています。」

人が倒れてます>あなた119番報  
通報してください。  
あなたAEDをもってきてください。



### 3)人工呼吸2回、胸骨圧迫30回を繰り返す

普段どおりの息がなければ人工呼吸を行いません。  
鼻をつまみ顎をあげて人工呼吸を2回行います。

**2 : 30 強く、正しく、絶え間なく**



人工呼吸2回と胸骨圧迫30回を繰り返します。

### 4)AEDの電源を入れる



緑のハンドルを引くと自動的に電源が入ります



電源を入れた後は、  
音声メッセージで案内されます。

### 5)電極パッドを傷病者の胸にはる

カードリッジから電極パッドを取り出し、  
表面に描かれている位置に貼ります。



『絵の通りにパッドを貼ります。』



パッドが貼られると  
自動的に解析が始まります。

